



IMPLA Mini

Piccoli ma efficaci



Mini impianti IMPLA piccoli ma efficaci

Per un impianto economico e sicuro.




Gli impianti one-piece IMPLA della serie Mini hanno una superficie sabbiata e acidificata di alta qualità. Con due diverse connessioni - sferica o conica - questi impianti offrono una vasta gamma di indicazioni.

Entrambe le varianti sono realizzate in titanio grado 4. Grazie alle loro dimensioni e forma, gli impianti IMPLA Mini sono adatti anche per la tecnica flapless e l'inserimento transgingivale, a seconda del singolo caso clinico. Il veloce protocollo chirurgico riduce i tempi di intervento. Inoltre, la piccola scatola chirurgica IMPLA Mini è sufficiente per inserire gli impianti.


Gli impianti IMPLA Mini sono una vera alternativa economica ai tradizionali impianti two-piece.

Impla Mini-testa sferica: ideale per il fissaggio semplice di protesi totali (protesi di copertura).

IMPLA Mini-testa conica: adatti al supporto di costruzioni a barra o corone individuali nel settore anteriore, dove lo spazio disponibile è limitato.

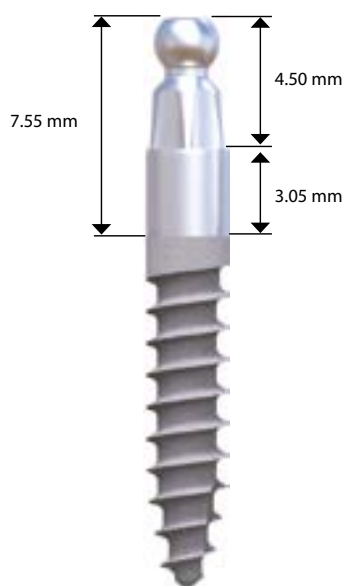

- Superficie ad alta purezza, sabbiata e acidificata, per un'osteointegrazione sicura
- Filettatura autofilettante per un inserimento facile e veloce
- Economico
- Diametro ridotto per l'inserimento minimamente invasivo
- Sistema organizzato in modo chiaro

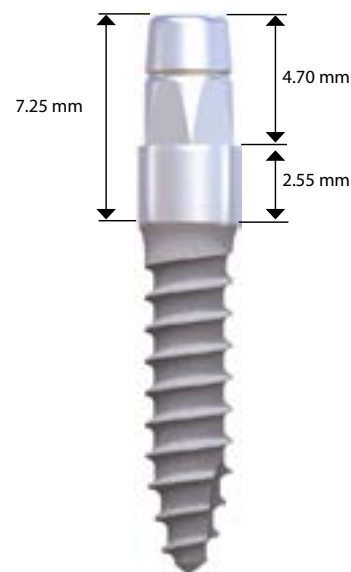

IMPLA Mini-testa sferica

diametro 2.1 mm	Ref.
lunghezza 9.5 mm	635481
lunghezza 11.5 mm	635482
lunghezza 13.0 mm	635483

diametro 2.5 mm	Ref.
lunghezza 9.5 mm	635484
lunghezza 11.5 mm	635485
lunghezza 13.0 mm	635486


IMPLA Mini-testa conica

diametro 3.0 mm	Ref.
lunghezza 9.5 mm	635474
lunghezza 11.5 mm	635471
lunghezza 13.0 mm	635473

Protesica IMPLA Mini testa sferica



Posizione dell'impianto dopo l'inserimento (modello). Gli impianti vengono inseriti con il dispositivo di inserimento meccanico (art. n. 637107) o, in alternativa, con il dispositivo di inserimento manuale (Ref.

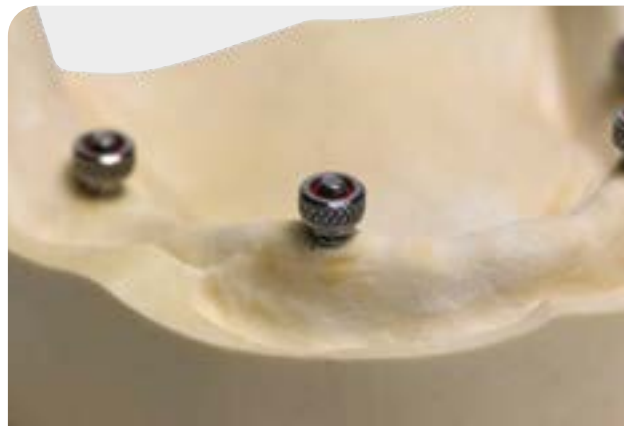

Montaggio delle matrici per testa sferica (modello). Si consiglia di bloccare la matrice della testa sferica in situ.



Superficie basale della protesi modellata intorno alle posizioni dell'impianto precedentemente contrassegnate.



Cera posizionata sulla parte oclusale delle matrici a testa sferica.



Opzionalmente, il laboratorio può polimerizzare le matrici delle teste sferiche sul modello master.

Suggerimenti

Si consiglia di polimerizzare in due fasi:
Fase 1: fissare occlusalmente sopra l'equatore della testa sferica (intraoralmente in occlusione terminale).
Fase 2: bloccare le superfici basali della matrice della testa sferica (extraoralmente).

Nota bene: questa panoramica non deve essere considerata un foglio di istruzioni. Si prega di attenersi alle istruzioni del sistema. L'intera responsabilità è del dentista/implantologo curante. L'aspetto reale dei singoli prodotti può variare rispetto alle foto e ai disegni di cui sopra.

Protesica IMPLA Mini testa conica



Impronta della situazione attuale con un analogo da laboratorio (Ref. 635493) e il tappo di trasferimento (Ref. 635495).



Situazione con analogo dell'implanto sul modello master.



Design individuale della cappetta sul tappo POM (Ref. 635491).



Copertura in metallo, montata sul modello master.



Copertura, veneer con Nuance 850.

Nota bene: questa panoramica non deve essere considerata un foglio di istruzioni. Si prega di attenersi alle istruzioni del sistema. L'intera responsabilità è del dentista/implantologo curante. L'aspetto reale dei singoli prodotti può variare rispetto alle foto e ai disegni di cui sopra.

Kit chirurgico, strumenti per l'inserimento e Accessori

Accessori chirurgici e strumenti di inserzione



Kit IMPLA MINI
Ref. 635127

BOX M Vuoto
Ref. 635590



Fresa iniziale 1.8 mm
Ref. 635230



Fresa iniziale 2.0 mm
Ref. 638813



Fresa chirurgica 2.5 mm
Ref. 638814



Chiave dinamometrica
Ref. 637123



Driver manuale per inserimento Impla Mini testa sferica
Ref. 637108



Driver inserimento corto
Ref. 637112

Accessori IMPLA Mini testa sferica



Driver da manopola per inserimento Impianti Mini Testa sferica
Ref. 637107



Analogo da laboratorio
Ref. 635487



Cappetta da impronta
Ref. 635488



Matrice a sfera aperta incluso O-ring
Ref. 635489



Matrice a sfera chiusa incluso O-ring
Ref. 635469



Matrice a sfera chiusa incluso O-ring
Ref. 635479



O-ring rosso per Matrice a sfera
Ref. 635499



O-ring verde per Matrice a sfera
Ref. 635500



O-ring rosso piccolo per Matrice a sfera piccola
Ref. 635468

Accessories IMPLA Mini-conetop



Driver manuale lungo
Ref. 637104



Analogo da laboratorio
Ref. 635493

Prosthetics set IMPLA Mini-conetop

Set protesico (Ref. 635503) composto da:



Cappetta da impronta
Ref. 635495



Calcinabile POM
Ref. 635491



Vite di fissaggio
Ref. 635502

L'aspetto reale dei singoli prodotti può variare rispetto alle foto e ai disegni di cui sopra.



Contatti

Siamo qui per voi:

Telefono	+39 0185 7887 860
Fax	+39 0185 7887 850
e-mail	implants@micerium.it

www.micerium.it

Venite a trovarci online!

SCHÜTZ  **DENTAL**
Micerium Group

implantologia  **M**
GRUPPO
MICERIUM

Micerium S.p.A. Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)
Tel. 0185 7887 860 • Fax 0185 7887 950 • implants@micerium.it • www.micerium.it